

Neurologia: Preencha este formulário para que o seu paciente o leve ao centro de IRM e faça uma cópia para incluir no prontuário médico do paciente.
Radiologia: Usando os dados deste formulário, insira o número do modelo e o local do implante na ferramenta de Condições Determinantes da Imagem por Ressonância Magnética ou consulte as Instruções de Uso (IFU) para IRM mais recentes, disponíveis on-line em www.livanova.com/epilepsy-vnsthery/en-gb/hcp/physician-manuals para informações sobre condições do procedimento antes de realizar um procedimento de imagem por ressonância magnética.

Informações de Contato

Nome do Paciente: _____
 Nome do Médico: _____
 Número de Telefone do Médico: _____
 Nome da Clínica: _____
 Endereço da Clínica: _____

INFORMAÇÕES DO GERADOR

Nº do Modelo do Gerador _____
 Nº de Série do Gerador _____
 Local do Implante
 (Sistema Terapia VNS localizado entre as vértebras C7 e T8).
 Lado esquerdo superior do peito, na axila ou acima da axila (acima da costela 4) Outros locais _____

Realize as seguintes etapas para preparar o paciente para um procedimento de IRM:

Analise o gerador Terapia VNS™ e registre as configurações do gerador
 Quando uma análise é realizada, o número de série do gerador, a data de implante e os parâmetros de estimulação são registrados na base de dados do programador e disponíveis para visualização.

Corrente de Saída Normal (mA):	
Frequência do Sinal (Hz)*	
Largura de Pulso (µs)*	
Tempo Ligado do Sinal (s)*	
Tempo Desligado do Sinal (min)*	
Corrente de Saída do Magneto (mA):	
Tempo Ligado do Magneto (s)*	
Largura de Pulso do Magneto (µs)*	

*Opcional para Modelo 103 e dispositivos mais recentes

Somente Modelos 106, 1000 e 1000-D

Corrente de Saída do AutoStim (mA):	
Detecção de Crises (Ligado/Desligado)	

Recursos Opcionais do Dispositivo somente para Modelos 1000 e 1000-D

Detecção de Frequência Cardíaca Baixa (Ligado/Desligado)	
Limite de Frequência Cardíaca Baixa (bpm, se ligado)	
Detecção de Posição Decúbito Ventral (Ligado/Desligado)	
Programação Programada (Ligado/Desligado)	

Realize o Diagnóstico do Sistema para garantir o funcionamento correto do gerador. _____ ohms

Reprograme a saída da estimulação da Terapia VNS para a posição OFF (desligado):

- Corrente de saída (mA): 0,0
- Corrente do Magneto (mA): 0,0
- Corrente do AutoStim (mA): 0,0 e detecção de crises em OFF

** Para modelos selecionados com o Modo AutoStim

Desligue todos os recursos opcionais do dispositivo (somente Modelos 1000 e 1000-D).

Analise o gerador para verificar se houve êxito na programação.

Determine se o posicionamento do gerador de Terapia VNS está entre as vértebras C7-T8 e localizado na área superior esquerda do peito, acima da costela 4. Agende

uma consulta após o procedimento de IRM para ligar a programação da estimulação da Terapia VNS assim que possível.

Eu desliguei a programação do sistema Terapia VNS do paciente em _____ às _____ h para facilitar o procedimento de IRM nas suas instalações.

Assinatura: _____ Nome por extenso: _____

LIVANOVA USA, INC.
 100 Cyberonics Boulevard
 Houston, Texas 77058, USA Tel:
 +1 (281) 228-7200 /
 +1 (800) 332-1375
 Fax: +1 (281) 218-9332
www.livanova.com

LIVANOVA BELGIUM NV
 Ikaroslaan 83
 B-1930 Zaventem, BELGIUM
 Tel: +3227209593
 Fax: +3227206053

Perguntas? Consulte www.easy-mri.com para a rotulagem do procedimento de IRM OU entre em contato com LivaNova Clinical Technical Services pelo número 1-866-882-8804.

Para obter importantes informações de segurança:

www.livanova.com/epilepsy-vnsthery/en-gb/hcp/safety-information.

O dispositivo foi avaliado quanto a riscos induzidos por IRM, incluindo aquecimento, estimulação indesejada, força, torque, mau funcionamento do dispositivo e vibração do dispositivo e foi determinado como seguro de acordo com as condições especificadas no rótulo; entretanto, o paciente poderá sentir sensações de calor ou vibração no local do implante durante a ressonância magnética.

Todas as marcas registradas e nomes comerciais são propriedades da LivaNova ou das subsidiárias consolidadas da LivaNova e estão protegidas pelas leis de propriedade intelectual aplicáveis. Para fins de conveniência, as marcas registradas e nomes comerciais da LivaNova poderão aparecer sem os símbolos ® ou TM; entretanto tais referências não se destinam a indicar que a LivaNova não reivindicará, de acordo com a lei aplicável, os direitos da LivaNova sobre tais marcas registradas e nomes comerciais. Será necessário obter permissão da LivaNova para o uso ou reprodução dos referidos direitos de propriedade intelectual. IM-7600854-EPI-PT_B



LivaNova
 Epilepsy

