

Neurologi: Vänligen, fyll i detta formulär så att patienten kan ta det med sig till MR-mottagningen. Gör också en kopia som ska inkluderas i patientens journal.

Radiologi: Med hjälp av uppgifterna från detta formulär, ange modellnumret och implantatets placering i verktyget Fastställande av villkor för MR-undersökning. Alternativt, se de senaste bruksanvisningarna för MR som finns tillgängliga online via www.livanova.com/epilepsy-vnstherapy/en-gb/hcp/physician-manuals, angående undersökningsvillkor innan du går vidare med en MR-undersökning.

Kontaktinformation

Patientens namn: _____

Läkarens namn: _____

Läkarens telefonnummer: _____

Vårdinrättningens namn: _____

Vårdinrättningens adress: _____

INFORMATION OM GENERATORN

Generatorns modellnr _____

Generatorns serienr _____

Implantationsplacering

(VNS Therapy-system placerat mellan cervikalkota C7 och thorakalkota T8)

Uppe till vänster på bröstet i höjd med eller ovanför armhålan (ovanför revben 4) Andra platser _____

Gör följande för att förbereda patienten för en MR-undersökning:

Läs av VNS Therapy™-generatoren och notera generatorinställningarna.

När en avläsning utförs loggas generatorns serienummer, implantationsdatum och stimuleringsparametrar i programmerarens databas och kan visas.

Normal utgående ström (mA)	
Signalfrekvens (Hz)*	
Pulsbredd (µs)*	
Signal On Time (s)*	
Signal Off Time (min)*	
Magnetens utgående ström (mA)	
Magnetens On Time (s)*	
Magnetpulsbredd (µs)*	

* Valfritt för modell 103 och nyare instrument

Endast modellerna 106, 1000 och 1000-D

AutoStim uteffekt (mA)	
Anfallsdetektering (På/Av)	

Tillvalsfunktioner, endast modellerna 1000 och 1000-D

Detektering av låg hjärtfrekvens (På/Av)	
Tröskelvärde för låg hjärtfrekvens (bpm om på)	
Detektering av framstupaläge (På/Av)	
Schemalagd programmering (På/Av)	
Dag/Natt-programmering (På/Av)	

Utför en systemdiagnostik för att verifiera att generatoren fungerar korrekt.

ohm

Programmera om utmatningen för VNS Therapy-stimuleringen till AV:

- Utgående ström (mA): 0,0
- Magnetström (mA): 0,0
- AutoStim-ström** (mA): 0,0 och anfallsdetektering till AV

** för utvalda modeller med AutoStim-läge

Slå av alla andra valfria instrumentfunktioner (endast modellerna 1000 och 1000-D).

Avläs generatoren för att verifiera att programmeringen lyckades.

Fastställ om placeringen av VNS Therapy-generatoren är mellan cervikalkota C7 och thorakalkota T8 och sitter i området uppe till vänster i bröstet, ovanför revben 4.

Boka ett besök på vårdinrättningen efter MRT-undersökningen för att programmera VNS Therapy-stimuleringen till PÅ så snart som möjligt.

Jag har programmerat patientens VNS Therapy-system till AV den _____ kl. _____ för att underlätta MRT-undersökningen på din vårdavdelning.

Signatur: _____ Namnförtydligande: _____

LIVANOVA USA, INC.
100 Cyberonics Boulevard
Houston, Texas 77058, USA
Tfn: +1 (281) 228-7200 /
+1 (800) 332-1375
Fax: +1 (281) 218-9332
www.livanova.com

LIVANOVA BELGIUM NV
Ikaroslaan 83
B-1930 Zaventem
BELGIEN
Tfn: +32 2 720 95 93
Fax: +32 2 720 60 53

Har du frågor till oss? Se www.easy-mri.com för MR-märkning ELLER kontakta LivaNova Clinical Technical Services på +1 866 882 88 04.

Viktig säkerhetsinformation finns på: www.livanova.com/epilepsy-vnstherapy/en-gb/hcp/sakerhetsinformation.

Enheten har utvärderats för MRT-inducerade risker, inklusive uppvärmning, oavsiktlig stimulering, kraft, moment, funktionsfel på instrumentet och enhetsvibration och har fastställts vara säker under tillstånden som anges på etiketten. Patienten kan dock uppleva värme eller vibration vid implantatets plats under MRT-undersökningen.

Alla varumärken och handelsnamn tillhör LivaNova eller LivaNovas konsoliderade dotterbolag och skyddas enligt gällande immaterialrättslagstiftning. Av bekvämlighetsskäl kan LivaNovas varumärken och handelsnamn visas utan symbolerna ® eller TM, men sådana referenser är inte avsedda att på något sätt indikera att LivaNova inte i full utsträckning kommer att hävda LivaNovas rättigheter till dessa varumärken och handelsnamn i enlighet med gällande lagstiftning. Tidigare tillstånd från Livanova krävs för användning eller reproduktion av sådana immateriella rättigheter. IM-7600854-EPI_B_SE



LivaNova
Epilepsy

